



## PRODUCTO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DISPOSITIVOS SANITARIOS EN EL ÁMBITO DENTAL

### DENTASEPT® SH PRO Wipes

#### DENTASEPT SH PRO WIPES SON UNAS TOALLITAS INDICADAS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DISPOSITIVOS SANITARIOS EN EL ÁMBITO DENTAL

Combinan una eficacia de amplio espectro y tiempos de contacto cortos con una excelente compatibilidad de los materiales y las propiedades de un limpiador suave.

Dentasept SH Pro Wipes son adecuadas para utilizar en una amplia gama de dispositivos y se pueden utilizar en la práctica según lo previsto en sus protocolos, ofreciendo los resultados de desinfección y el nivel de cumplimiento necesarios para restringir la propagación de patógenos.

- Se puede utilizar en dispositivos sensibles al alcohol
- Fórmula eficiente sin perfume ni tinte
- Limpieza y desinfección en un solo paso, dejando el dispositivo visiblemente limpio
- Toallitas de viscosa 100% biodegradables



# DENTASEPT® SH PRO Wipes

Combinan una eficacia de amplio espectro y tiempos de contacto cortos con una excelente compatibilidad de los materiales (incluidos los objetos sensibles al alcohol) y las propiedades de un limpiador suave

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Limpia y desinfecta en un solo paso
- Sin alcohol, perfume ni tinte
- Amplio espectro antimicrobiano con un corto tiempo de contacto
- pH 6
- La fórmula garantiza la compatibilidad con una amplia gama de materiales, incluidos los polímeros (por ejemplo, policarbonato y plexiglás)
- El sustrato de las Dentasept SH Pro Wipes es 100% viscosa

## INSTRUCCIONES DE USO



1 Toallitas listas para usar. Duración de uso después de la apertura según EN 16615: 3 meses.



2 Aplicar en la zona del producto sanitario (PS) que desee tratar, usando tantas toallitas como sea necesario.



3 Tiempo de contacto mínimo: 2 minutos. Realizar un enjuague abundante con agua del suministro de las zonas tratadas del producto sanitario destinadas a entrar en contacto con la piel o las mucosas bucales, excepto para los productos tratados con envoltorio.



4 Cerrar bien el envase tras cada apertura. No reutilizar la toallita. La desinfección no podría garantizarse.

## PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

ACTIVIDAD/CONDICIONES	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida en 2 min.: EN 16615 (en 2 min.), EN 13727* (en 1 min.)	2 min
Levuricida en 2 min.: EN 16615/EN 13624* (en 2 min.).	2 min
Tuberculicida* según EN 14348*	60 min
Activo en virus encapsulados según EN 14476*	1 min
Activo en Polyomavirus SV 40 según EN 14476*	5 min
Activo en Rotavirus según EN 14476*	30 sec
Virucida de espectro limitado según EN 14476*	30 min
Adenovirus	30 min
Norovirus (MNV)	15 min

\*=condiciones de suciedad

## INFORMACIÓN DE PEDIDO

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
Dentasept SH Pro Wipes	6 x 100 toallitas (180 x 200 mm)	3127040



D.M.D.  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Distribuido por:  
**ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, S.L.**  
Avinguda del Baix Llobregat n.ºs. 3-5  
Sant Joan Despí-08970

## ÁMBITO DE APLICACIÓN

Tratamiento de los productos sanitarios en medio dental:

- Entre dos pacientes: limpieza y desinfección de los productos sanitarios no sumergibles y no invasivos, como cuerpos de lámparas de fotopolimerización;
- Antes de las etapas de limpieza, desinfección y esterilización de los productos sanitarios (por ejemplo: piezas de mano rotativas, turbinas, contra-ángulos) y según las indicaciones del fabricante: embalaje para transporte hacia esterilización o limpieza.

## INSTRUCCIONES DE USO

- 1) Toallitas listas para usar. Duración de uso después de la apertura según EN 16615: 3 meses.
- 2) Aplicar en la zona del producto sanitario (PS) que desee tratar, usando tantas toallitas como sea necesario.
- 3) Tiempo de contacto mínimo: 2 minutos. Realizar un enjuague abundante con agua del suministro de las zonas tratadas del producto sanitario destinadas a entrar en contacto con la piel o las mucosas bucales, excepto para los productos tratados con envoltorio.
- 4) Cerrar bien el envase tras cada apertura. No reutilizar la toallita. La desinfección no podría garantizarse.

## INGREDIENTES

Solución de impregnación:, Cloruro de didicildimetilamonio, excipientes.

## CERTIFICADOS

Producto sanitario. La actividad antimicrobiana completa de Dentasept SH Pro Wipes se incluye en el expediente científico y está disponible previa solicitud.

## ALMACENAMIENTO

Almacenamiento: entre +5°C y +25°C.

## USAR CON PRECAUCIÓN

Leer la información de la etiqueta y el producto.



PARA USO PROFESIONAL.



www.anios.com