



DETERGENTE PARA LA **DESINFECCIÓN** DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO

DENTASEPT Tri-Enzymatic

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL INSTRUMENTAL DENTAL ANTES DE SU ESTERILIZACIÓN

- Triple formulación de enzimas: proteasa, lipasa y amilasa
- No contiene cloruros
- Un litro proporciona 200 litros de solución lista para usar
- Eficacia en solo 7 minutos
- Actúa contra los virus con envoltura
- Se puede utilizar en baños de ultrasonidos
- pH neutro; después de diluir es compatible con una amplia gama de materiales



DENTASEPT Tri-Enzymatic

Limpieza y desinfección del instrumental dental antes de su esterilización

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


- pH puro del producto: aprox. 8,5
- pH al 1,0% en agua del grifo: 7,3
- pH al 1,0% en agua blanda: 7,6

INSTRUCCIONES DE USO

Solución concentrada. Para los envases de 5 L: Cebe la bomba asociada antes del primer uso.



Se utiliza en inmersión o en tanque de ultrasonidos a la dilución requerida, respetando el tiempo de contacto indicado.

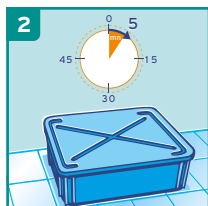

Sumergir completamente el producto sanitario. Mantener el baño de inmersión cubierto durante el tiempo de contacto.



Cepillar si hubiera suciedad visible.



Enjuagar abundantemente con agua del suministro los producto sanitarios tratados para eliminar cualquier resto de producto y suciedad orgánica.

Cambiar la solución en cuanto esté visiblemente sucia y como mínimo una vez al día para mantener la eficacia del producto.

CUADRO DE DOSIFICACIÓN

POR LITRO DE SOLUCIÓN	CONCENTRACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE APLICACIÓN
	0,5%
1 litro	5 ml
2 litros	10 ml
5 litros	25 ml
10 litros	50 ml

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

ACTIVIDAD/CONDICIONES	CONCENTRACIÓN	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida* Según EN 13727/EN 14561	0,5%	5 min
Levuricida* Según EN 13624/EN 14562	0,5%	5 min
Activo en virus encapsulados* Según EN 14476/EN 17111	0,5%	7 min

*=condiciones de suciedad

INFORMACIÓN SOBRE EL ENVASE Y EL PEDIDO

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
Dentasept Tri-Enzymatic	12 botellas de 1 L	3127300
Dentasept Tri-Enzymatic	1 garrafa de 5 L con dosificador de 10 ml	3127800



D.M.D.
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuido por:
ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, S.L.
Avinguda del Baix Llobregat n.ºs. 3-5
Sant Joan Despí-08970
Spain

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Limpieza y desinfección del instrumental dental antes de su esterilización.

INSTRUCCIONES DE USO

Solución concentrada.

Para los envases de 5 L: Cebe la bomba asociada antes del primer uso.

1. Se utiliza en inmersión o en tanque de ultrasonidos a la dilución requerida, respetando el tiempo de contacto indicado.
2. Sumergir completamente el producto sanitario. Mantener el baño de inmersión cubierto durante el tiempo de contacto.
3. Cepillar si hubiera suciedad visible.
4. Enjuagar abundantemente con agua del suministro los producto sanitarios tratados para eliminar cualquier resto de producto y suciedad orgánica.

Cambiar la solución en cuanto esté visiblemente sucia y como mínimo una vez al día para mantener la eficacia del producto.

INGREDIENTES

Propionato de amonio cuaternario, Digluconato de clorhexidina, tensioactivos no iónicos, complejo enzimático (proteasa, lipasa y amilasa), perfume, colorante, excipientes.

ALMACENAMIENTO

Peligroso: respetar las precauciones de uso (elaboradas según las normas europeas vigentes en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos). Almacenamiento: de +5°C a +25°C.

CERTIFICADOS

Producto sanitario. La actividad antimicrobiana completa de Dentasept Tri-Enzymatic se incluye en el expediente científico y está disponible previa solicitud.

USAR DE FORMA SEGURA

Leer la información de la etiqueta y el producto.



PARA USO PROFESIONAL.

