

CAJA DE FORMACIÓN SOBRE LA TÉCNICA DE FRICCIÓN

Coucou Box

MATERIAL DESTINADO A LA VALIDACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS ESTANDARIZADAS DE FRICCIÓN DE MANOS

- Diseño ligero y ecológico
- Fácil de montar
- Fácil de usar
- Incluye 2 linternas que funcionan con LED-UV
- Debe ser utilizada en combinación con un gel de entrenamiento fluorescente



Coucou Box

INDICACIONES

Coucou Box está destinada a fines de entrenamiento para demostrar la correcta desinfección de manos. Usando el gel de manos fluorescente (Aniosgel 85 NPC fluorescente) y después de frotar, se pueden determinar, con ayuda de la tecnología UV-LED, las áreas de la piel que no están cubiertas con gel.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones:

Embalaje plano: L 74 x P 50.5 x A 7 cm

Una vez montado: L 53.5 x P 38.5 x A 41 cm

Coucobox no está destinada a ser desmontada después de cada uso.

Descripción:

- Fabricada con cartón 100% reciclable.
- Equipada con asa de transporte y doble visualización (usuario/entrenador).

Características:

- 2 linternas LED funcionan con 3 pilas LR06AA (incluidas)*.

REFERENCIA

PRODUCTO	REFERENCIA
Caja pedagógica completa con 2 linternas UV (incluye 6 pilas)	10153491

* Incluyen pilas.

En caso de desgaste o mal funcionamiento, es responsabilidad del cliente reemplazarlas.

INDICACIONES DE USO

1. Configurar la caja (entregada plana) con la ventana de visualización en la parte superior
2. Coloque las 2 linternas, así como el producto fluorescente en las áreas previstas en la parte superior de la caja
3. Una vez que la luz UV es visible, se puede comenzar con el entrenamiento
4. Tome una cantidad suficiente de producto fluorescente (por ejemplo: Aniosgel 85 NPC fluorescente) en el cuenco de la mano
5. Friccionar las manos completamente, prestando especial atención a las yemas de los dedos, áreas de las uñas y pulgares
6. Frotar durante al menos 30 segundos
7. Introduce las manos por las aberturas de la caja
8. Compruebe el nivel de rendimiento a través de la visualización por la ranura.

Evaluación de los resultados:

Las áreas de la piel que no son desinfectadas adecuadamente son aquellas áreas de la manos que no emiten fluorescencia bajo luz UV (áreas oscuras).

Consulte al formador para analizar los resultados.

PRECAUCIONES DE USO

Lea las instrucciones de uso antes de utilizar el dispositivo. Observe las precauciones para su uso en la etiqueta del producto utilizado (elaborado según a las normas europeas vigentes sobre Clasificación y etiquetado de productos químicos). Información disponible en la ficha de datos de seguridad y la etiqueta.

Distribuido por:

ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, S.L.

Avinguda del Baix Llobregat n°s. 3-5
Sant Joan Despí-08970



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™