

# CAJA DE FORMACIÓN SOBRE LA TÉCNICA DE FRICCIÓN

## Coucou Box

### MATERIAL DESTINADO A LA VALIDACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS ESTANDARIZADAS DE FRICCIÓN DE MANOS

- Material de alta resistencia
- Fácil de usar
- Conectable a un monitor
- Tecnología LED-UV
- Debe ser utilizada en combinación con un gel fluorescente



# Coucou Box

## INDICACIONES

Coucou Box está destinada a fines de entrenamiento para demostrar la correcta desinfección de manos. Usando el gel de manos fluorescente (Aniosgel 85 NPC fluorescente) y después de frotar, se pueden determinar, con ayuda de la tecnología UV-LED, las áreas de la piel que no están cubiertas con gel.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Dimensiones:

Medidas: L 52cm x P 41cm x A 40cm  
Peso: 3.5kg.

### Descripción:

Diseñada en material de PVC de alta resistencia y alta presión.

### Especificaciones eléctricas:

Alimentación: 230 V monofásica + PE 50 Hz / Potencia: 23 VA.

### Alimentación:

Toma normalizada 10/16 A 230 V monofásico + PE 50 Hz, protegido por un diferencial de 30 mA máx.

### Elementos eléctricos:

- 3 x 3W LEDs Ultravioletas.
- 1 toma macho de 2 polos +PE, con 5 fusibles de 20 mm (315 mA) e interruptor.
- 1 cable de alimentación de 2 polos +PE.

## REFERENCIAS

PRODUCTO	REFERENCIA
Coucou Box	10055140

## INDICACIONES DE USO

1. Tome una cantidad suficiente de producto fluorescente (Aniosgel 85 NPC fluorescente) en el cuenco de la mano.

Friccionar las manos completamente, prestando especial atención a las yemas de los dedos, las áreas de las uñas y los pulgares. Frote durante al menos 30 segundos.

2. Introduce las manos por las aberturas de la máquina.

### Evaluación de los resultados:

Las áreas de la piel que no se desinfectan adecuadamente son aquellas áreas de las manos que no emiten fluorescencia bajo luz UV (áreas oscuras).

Consulte al formador para analizar los resultados.

## PRECAUCIONES DE USO

Lea las instrucciones del fabricante antes de usar el dispositivo. Observar las precauciones de uso en la etiqueta del producto utilizado (elaborada de acuerdo con las normas europeas vigentes sobre clasificación y etiquetado de productos químicos). Información disponible en la ficha de datos de seguridad y la etiqueta.

Distribuido por:

**ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, S.L.**

Avinguda del Baix Llobregat nºs. 3-5  
Sant Joan Despí-08970



**ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH**

Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein  
Germany

**ECOLAB®**  
PROTECTING WHAT'S VITAL™