



DETERGENTE PRE-DESINFECTANTE PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

Aniosyme X3

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICO Y EQUIPAMIENTO DE ENDOSCOPIA PREVIO A LA ESTERILIZACIÓN

- Fórmula patentada
- Eficacia antimicrobiana optimizada desde los 5 minutos
- No corrosivo con los materiales




Aniosyme X3

Limpieza y desinfección de instrumental médico-quirúrgico y equipamiento de endoscopia previo a la esterilización


CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

- Complejo trienzimático
- Eficacia probada mediante DCP (*Degreasing Cleaning Power- Poder de Limpieza Desengrasante)
- pH neutro: compatible con aleaciones
- Ausencia de cloro: sin efecto corrosivo sobre los materiales
- Compatible con proceso de ultrasonidos
- Líquido azul claro
- pH en dilución (0,5%): con agua corriente: aproximadamente 7,5


INSTRUCCIONES DE USO

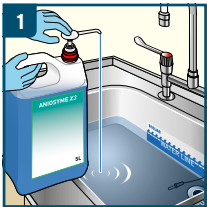


1 Solución concentrada de uso profesional. Utilizar mediante inmersión a una dilución adecuada respetando el tiempo de contacto.

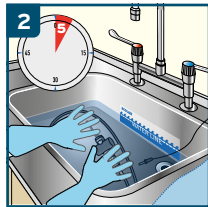

2 Sumerja totalmente el producto sanitario. Utilice un cepillo si lo cree necesario.

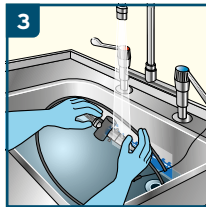

3 Aclare abundantemente el producto sanitario en agua del grifo y elimine así todos los residuos orgánicos del instrumental.

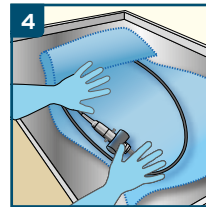

4 Reemplace la solución tan pronto como esté visiblemente sucia y al menos una vez al día para mantener la efectividad del producto.

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

CONDICIONES	CONCENTRACIÓN	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida - Acorde con EN 13727 y EN 14561, en condiciones sucias	0,5%	5 min
Levaduricida - Acorde con EN 13624 y EN 14562, en condiciones sucias	0,5%	5 min
Eficacia frente a virus envueltos acorde con EN 14476/EN 17111, condiciones sucias	0,5%	7 min


EMBALAJE Y INFORMACIÓN DE PEDIDOS

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
Aniosyme X3	12 x Envase de 1 L	3119820
Aniosyme X3	4 x Envases de 5 L con válvula de 25 ml	3119840



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuido por:
ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, S.L.
Avinguda del Baix Llobregat n.ºs. 3-5
Sant Joan Despí-08970

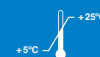

PARA USO PROFESIONAL.

ÁREA DE APLICACIÓN

Limpieza y desinfección de instrumental médico-quirúrgico y equipamiento de endoscopia previo a la esterilización.

INSTRUCCIONES DE USO

Solución concentrada de uso profesional. Utilizar mediante inmersión a una dilución adecuada respetando el tiempo de contacto. Sumergir totalmente el producto sanitario. Cepillar si se observa suciedad visible. Aclarar abundantemente con agua para eliminar todos los residuos. Reemplace la solución tan pronto como esté visiblemente sucia y al menos una vez al día para mantener la efectividad del producto.

COMPOSICIÓN

Amonios cuaternarios, digluconato de clorhexidina, surfactantes no iónicos, complejo enzimático (proteasa, lipasa y amilasa), perfume, colorante y excipientes.

ALMACENAMIENTO

Peligroso- respetar las precauciones de uso (elaborado de acuerdo con las normas europeas vigentes en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos). Almacenar de 5°C a 25°C.

CERTIFICADOS

Producto sanitario. La actividad antimicrobiana completa se encuentra incluida en el dossier técnico de producto disponible bajo demanda.

PRODUCTO SANITARIO. UTILIZAR CON PRECAUCIÓN

Por favor lea el etiquetado del producto para más información.