



DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA ALCALINA QUIMIOTÉRMICA

Sekumatic™ LDI

LÍQUIDO ALCALINO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN QUIMIOTÉRMICA DE INSTRUMENTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS

- Eficacia detergente fuerte
- Recomendado cuando hay presencia significativa de residuos orgánicos
- La dilución, temperatura y tiempo de contacto pueden ser adaptados dependiendo de la eficacia buscada
- pH alcalino
- Libre de fosfatos, EDTA y NTA



Sekumatic™ LDI

Líquido alcalino para la limpieza y desinfección quimiotérmica de instrumentos médico-quirúrgicos y dispositivos médicos



Sekumatic LDI
Botella de 5 L

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Solución transparente, ligeramente amarilla
- pH del producto puro a 20°C: mín. 13 - máx. 14
- pH del producto diluido en agua corriente: - de 0,1% a 0,5%: 9,5 a 11,5 - al 1%: 12%
- pH diluido en agua desmineralizada: - de 0,1% a 0,5%: 11,5 a 12 - al 1%: 12
- Conductividad (solución, 1 - 5 - 10 ml/l en agua desionizada) 20°C 0,8 - 3,2 - 5,8 mS/cm
- Densidad a 20°C: 1,3 aprox

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

CONDICIONES	CONCENTRACIÓN	TIEMPO DE CONTACTO	TEMPERATURA
Bactericida - Según EN 13727/ EN 14561, condiciones sucias	0,5%	10 min	55°C
Levaduras - Según EN 13624/ EN 14562, condiciones sucias	0,5%	10 min	55°C
Micobactericida - Según EN 14348/ EN 14563, condiciones sucias	1,0%	10 min	55°C
Eficaz contra virus envueltos - Según EN 14476/EN 17111, condiciones sucias	1,0%	5 min	20°C
Virucida - Según EN 14476/ EN 17111, condiciones sucias	1,0%	5 min	55°C

INFORMACIÓN DE PEDIDO

PRODUCTO	EMBALAJE	REFERENCIA
Sekumatic LDI	2 x Envase 5L	3111500

ÁREA DE APLICACIÓN

Líquido alcalino para la limpieza y desinfección quimiotérmica de instrumentos médicos y quirúrgicos y dispositivos médicos como camas, carros, contenedores, mesitas de noche y mesas de quirófano en todos los sistemas de lavado habituales, para todos los artículos que puedan lavarse a máquina.

INSTRUCCIONES DE USO

Solución concentrada. Para el reprocesamiento automatizado de dispositivos médicos en lavadoras desinfectantes, túneles y cabinas de lavado.

- Utilizar con una dilución de 0,1% a 1,0%, preferiblemente en agua de tibia a caliente, según el tipo de máquina (para limpieza quimiotérmica)
- Utilizar con una dilución del 0,5% - 1,0%, preferiblemente en agua de tibia a caliente, según el tipo de máquina (para limpieza y desinfección quimiotérmica)
- Respetar la concentración y el tiempo de contacto requeridos. Se aconseja el uso de un producto de aclarado ácido en función de la calidad del agua y la concentración
- Cualquier producto ácido debe ir seguido de un ciclo de aclarado
- Asegúrese de la compatibilidad del material antes de su uso
- Efectivo a partir de 5 minutos
- Temperatura máxima: 55°C

INGREDIENTES

Agente alcalino. Tensioactivos no iónicos y anfóteros. Agente dispersante y anticorrosivo.

ALMACENAMIENTO

Peligroso - respetar las precauciones de uso (elaboradas según la normativa europea vigente en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos). Almacenamiento: entre +5°C y +25°C.

CERTIFICADOS

Dispositivo médico. La actividad antimicrobiana completa de Sekumatic LDI está incluida en el dossier científico, disponible bajo petición.

DISPOSITIVO MÉDICO USAR CON PRECAUCIÓN

Por favor, lea la información indicada en la etiqueta del producto.



PARA USO PROFESIONAL.