

# TOALLITAS DESINFECTANTES PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOS

## ANIOS QUICK WIPES

### TOALLITAS DESINFECTANTES PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOS

Toallita desinfectante de acción rápida y lista para usar para dispositivos médicos no invasivos y no sumergibles previamente limpios y resistente al alcohol.

- Sin enjuague
- En base a etanol
- Amplio espectro en poco tiempo de contacto
- Formulado sin colorante
- Fragancia agradable



# ANIOS QUICK WIPES

Toallitas desinfectantes para dispositivos médicos no invasivos

## CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

- Composición: celulosa, viscosa, aglutinante acrílico (grosor 23g/m2)

La solución de impregnación ANIOS QUICK WIPES es:

- Transparente e incolora
- Fragancia: té al limón
- Gravedad específica a +20°C: aproximadamente 0.9
- pH at 20°C: 5.5

## PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

STANDARDS	TIEMPO DE CONTACTO
EN 16615* (bactericida, levaduricida)	30 seg
Líquido de impregnación:	
EN 13727*(bactericida)	30 seg
EN 13624* (levaduricida)	30 seg
EN 13624*(fungicida)	5 min
EN 14348* (tuberculocida)	30 seg
EN 14348* (micobactericida)	5 min
EN 14476* (Eficaz frente a virus envueltos) Vaccinia	30 seg
EN 14476* (virucida de espectro limitado) (Adenovirus / Norovirus (MNV))	5 min (30 seg/5 min)

\* condiciones limpias

## INFORMACIÓN DE PEDIDO

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
ANIOS Quick Wipes (dimensión de la toallita: 130 x 190 mm)	12 x 120 toallitas	3133582

## ÁREA DE APLICACIÓN

Desinfección de acción rápida. Toallita lista para usar para dispositivos médicos no invasivos y no sumergibles previamente limpios y resistentes al alcohol.

## INSTRUCCIONES DE USO

Toallitas listas para usar. Uso en dispositivos médicos previamente limpios. Aplicar en toda la zona a tratar, usando tantas toallitas como sea necesario. Respetar el tiempo de contacto indicado para la actividad antimicrobiana requerida. Enjuague bien las áreas tratadas destinadas a entrar en contacto con piel o mucosa con agua del grifo. Repita la aplicación tan a menudo como necesario.

Cierre el embalaje correctamente después de cada uso.

No reutilizar la toallita: La desinfección se puede ver comprometida.

Observaciones: Antes de la aplicación, verifique la compatibilidad de los dispositivos médicos con alcohol.

Los dispositivos eléctricos que vayan a ser desinfectados debe estar apagados.

Período de caducidad una vez abierto el envase: 3 meses.

## INGREDIENTES

La solución de impregnación contiene: Etanol (CAS N° 64-17-5) 550 mg/g, N,N-Didecil-N-metil-poli(oxietil) propionato de amonio (CAS N° 94667-33-1) 1,1 mg/g, perfume.

## CERTIFICADOS

Producto sanitario. La actividad antimicrobiana completa se incluye en el expediente científico, disponible bajo petición.

## ALMACENADO

Almacenar entre +5°C y +25°C.

## PRODUCTO SANITARIO. USAR DE FORMAM SEGURA

Por favor, lea la etiqueta y el producto información.



PARA USO EXCLUSIVO PROFESIONAL.