



SOLUCIÓN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA PRODUCTOS SANITARIOS

ANIOSPRAY QUICK

DESINFECTANTE LÍQUIDO

Desinfección rápida de equipamiento médico y productos sanitarios no sumergibles, no invasivos y resistentes al alcohol.

Solución lista para usar

- Composición en base a etanol
- Amplio espectro de actividad en tiempos cortos de contacto
- No deja rastro al secar
- Agradable perfume
- No tiñe



ANIOSPRAY QUICK

Solución desinfectante



Aniospray Quick
1L

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO:

- Producto listo para usar
- Solución transparente e incolora
- Densidad: aprox 0.9
- pH at +20°C: aprox 5.6

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

STANDARDS	TIEMPO DE CONTACTO
EN 13697* (Bactericida)	30 seg
EN 13697* (Levaduricida)	30 seg
EN 13697* (Fungicida)	5 min
EN 13727* (Bactericida)	30 seg
EN 13624* (Levaduricida)	30 seg
EN 13624* (Fungicida)	5 min
EN 14348* (Tuberculicida)	30 seg
EN 14348* (Micobactericida)	5 min
EN 14476* (Efectivo frente a virus envueltos)	30 seg
EN 14476* (espectro virucida limitado) (Adenovirus / Norovirus (MNV))	5 min 30 seg/5 min
EN 16777* (Efectivo frente a virus envueltos)	30 seg
EN 16777* (espectro virucida limitado) (Adenovirus / Norovirus (MNV))	5 min 30 seg/5 min

* Condiciones limpias

INFORMACIÓN DE PEDIDO

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
ANIOSPRAY QUICK	12 x 1L	3132892

ÁREA DE APLICACIÓN

Desinfección rápida de los productos sanitarios y equipamientos médicos no sumergibles, no invasivos y resistentes al alcohol.

INSTRUCCIONES DE USO

Listo para usar. Utilizar en productos sanitarios previamente limpios. Pulverizar el spray en las áreas a tratar hasta que estén totalmente cubiertas. Aplique una cantidad suficiente (+/- 40ml/m²). Para una correcta desinfección toda la superficie debe quedar mojada. Respetar el tiempo de contacto indicado según la eficacia microbiológica deseada. No requiere enjuagado excepto si la superficies va a ser susceptible de contacto con mucosas.

Antes de usar el producto, compruebe la compatibilidad de las superficies a tratar con alcohol.

Los dispositivos electrónicos que vayan a ser desinfectados deben estar apagados.

INGREDIENTES

Etanol (CAS N° 64-17-5) 550 mg/g, N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl) ammonium propionate (CAS N° 94667-33-1) 1.1 mg/g, perfume

CERTIFICADOS

Producto sanitario. La actividad microbiológica completa de Aniospray Quick se encuentra recogida en el dossier de producto disponible bajo petición.

ALMACENADO

Almacenar entre +5°C y +25°C.

PRODUCTO SANITARIO

Por favor lea la etiqueta y la información de producto.



PARA USO EXCLUSIVO PROFESIONAL.



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuido por:
ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, S.L.
Avinguda del Baix Llobregat n°s. 3-5
Sant Joan Despí-08970
España

ECOLAB[®]
PROTECTING WHAT'S VITAL[™]